


感染予防対策 消毒・除菌方法の紹介

※一般的な消毒・除菌方法を紹介しています。
機器などに関しては各メーカーHPを参考にしてください。

2. 体温計

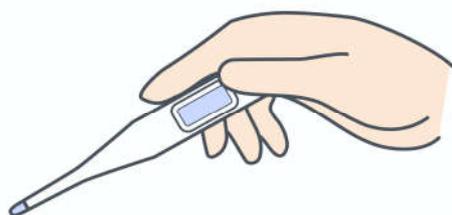

《一般的な消毒方法》

基本的な方針としては、それぞれの利用者ごとに専用の体温計を用意することが好ましいが、準備が困難な場合は利用者ごとに消毒を実施する。

必ず本体の電源を切り、消毒液を含ませたやわらかい布や脱脂綿で汚れを拭き取る。その後、ぬるま湯や水を含ませたやわらかい布もしくは脱脂綿で消毒液を拭き取る。この際に本体内部に水が侵入しないように水気をよく切ってから清掃する。乾燥は乾いたやわらかい布で水気をよく拭き取り自然乾燥をする。

《注意点》

- ・体温計は完全防水ではないため、水に浸けると不具合が発生する可能性があるので注意する。
- ・アルコールを使って汚れを拭き取る場合は、表示部にかからないように注意する。
- ・上限濃度を超えた濃度の消毒液を使用した場合は、本体が劣化するおそれがあるので注意する。

《参考・引用》

オムロンヘルスケア株式会社、よくあるご質問

https://www.faq.healthcare.omron.co.jp/faq/show/4506?category_id=413&site_domain=jp

健栄製薬株式会社、器械・器具に対する消毒薬の選び方

<https://www.kenei-pharm.com/medical/countermeasure/machine/>

吉田製薬株式会社、Y's Square、セミクリティカル器具の消毒

http://www.yoshida-pharm.com/2012/text03_02/

日本薬剤師会、消毒の知識

<http://www.nagoya-yakuzaishi.com/wp-content/uploads/2018/11/shoudoku.pdf>