

感染予防対策 消毒・除菌方法の紹介

※一般的な消毒・除菌方法を紹介しています。
機器などに関しては各メーカーHPを参考にしてください。

7 (2) . 運動療法機器 [スライディングボード]



《一般的な消毒方法》

- 使用ごとに清拭、消毒を行う。
- 消毒液やアルコールを噴霧または乾いた布に染み込ませて拭き取りを行う²⁾。
- 消毒装置を使用する場合は、取扱説明書に記載されている設定を確認し、変形防止のために平らな状態にして行う²⁾。
- 次亜塩素酸ナトリウム液を含む消毒液の噴霧については吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと。

《注意点》

- 各メーカー指定の希釈倍率で消毒液を使用しない場合や原液のまま使用する等の消毒方法は劣化につながるおそれがある。
- 有機溶剤（シンナーやベンジン）は使用しない²⁾。

《参考・引用》

1) 日本理学療法士協会、地域・在宅での感染予防対策

<https://tez123jp.wixsite.com/website>

環境面からの感染予防策

<https://vimeo.com/409079021>

2) 株式会社モルテン トランスファーボード取扱説明書

https://www.molten.co.jp/health/support/manual/files/sale/support/7/manual_easy-motion-b.pdf

3) 独立行政法人製品評価技術基盤機構 新型コロナウイルスに有効な界面活性剤が含まれている製品リスト

<https://www.nite.go.jp/information/osirase20200626.html>