

感染予防対策 消毒・除菌方法の紹介

※一般的な消毒・除菌方法を紹介しています。
機器などに関しては各メーカーHPを参考にしてください。

8 (4) . 測定機器 [聴診器]



《一般的な消毒方法》

- 使用ごとに清拭、消毒を行う。
- 濃度70%の消毒用アルコール（イソプロピルアルコール²⁾）を浸した拭き取り布で不消毒をする。

《注意点》

- 2%の漂白剤液を使用することも可能²⁾であるが、チューブ部分が色落ちすることがある。
- 手指用消毒剤は使用しない。
- 液体に浸したり、滅菌処理を行うことは控える。

《参考・引用》

1) 日本理学療法士協会、地域・在宅での感染予防対策

<https://tez123jp.wixsite.com/website>

環境面からの感染予防策

<https://vimeo.com/409079021>

2) スリーエム ジャパン株式会社、聴診器の清掃とお手入れ、聴診器（3MTM リットマンTM ステソスコープ）の消毒

https://www.littmann.jp/3M/ja_JP/littmann-stethoscopes-jp/my-stethoscope/using-your-stethoscope/stethoscope-care/

3) 独立行政法人製品評価技術基盤機構 新型コロナウイルスに有効な界面活性剤が含まれている製品リスト

<https://www.nite.go.jp/information/osirase20200626.html>